

HERGOM[®]
ASPIRADORES

Aparato de succión Manual
Hergom

Modelo 7B-1

- Lea cuidadosamente este manual antes de usar este producto
- Conserve este manual permanentemente



Manual de operación

Uso

El aspirador de succión manual se utiliza principalmente en diferentes niveles de un hospital para absorber la flema, purulencia y sangre. Con la ventaja de ser de tamaño pequeño, peso ligero, fácil de llevar y de utilizar. No necesita alimentación de electricidad, la unidad es ideal para áreas remotas, clínicas, para cuidados en el hogar, primeros auxilios en campo abierto y operaciones. Sin alimentación de electricidad.

2. Estructura y principio de funcionamiento.


La unidad se compone de un pistón, depósito para líquidos, unidad de succión.

Presione la manilla para poner al pistón en funcionamiento, de forma que suba y baje en el cilindro, produciendo una presión negativa.

La válvula adoptada en el sistema de una sola vía no producirá presión positiva, es segura y confiable.

Estructura ajustada, fácil de operar y cómodo de llevar.

Estructura de funcionamiento

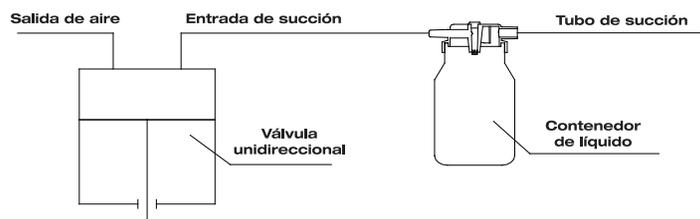

3. Especificaciones.

Vacío máximo: ≥ 0.04 MPa

Dimensión: 17x5x18 cm³

Capacidad de la botella de succión: 200ml

Peso: 192g

4. Manejo.

1) Inspección al desempaquetar.

El cliente deberá inspeccionar cuidadosamente si la apariencia del producto es buena y las variedades, así como asegurarse que la cantidad de accesorios es la correcta de acuerdo a lo señalado en la lista adjunta, antes de la instalación y el manejo. Además, el cliente deberá notificar oportunamente al distribuidor si existiera algún daño.

2) Instalación y depuración.

Conecte la tubería (con el tubo de succión desconectado temporalmente)

Nota: Mantenga la prueba de aire en todas las uniones en el transcurso de la instalación.

Función de Prueba

Bloquear la entrada de aspiración de aire con el dedo, presione la perilla unas diez veces y el valor del vacío aumentará. Retiré el dedo cuando escuche el flujo aéreo significa que la función es correcta.

5. Uso y Mantenimiento.

Uso

Compruebe el aparato antes de usar según la instalación y depuración de secuencia para asegurar su buen funcionamiento, posteriormente, inicie la operación mediante la conexión de la manguera de succión y el tubo de succión abdominal, ya esterilizados.

Mientras, presione el botón para ajustar el valor del vacío según las demandas de la operación.

Nota 1: Mientras se presiona el botón tiene que pulsar completamente para asegurar que la bomba en marcha succione completamente y así hacer frente a la ampliación de la demanda.

Nota2: Vacíe el soporte en su volumen medio por moco, sangre, oportunamente, para evitar cualquier contaminante o impureza en la bomba de succión.

Nota 3: La unidad deberá ser operada estrictamente bajo las instrucciones del médico personal de acuerdo con el ámbito de aplicación y la secuencia del funcionamiento, incluidas en el manual de instrucciones. Póngase en contacto con el distribuidor o fabricante si hay cualquier duda.

Mantenimiento

-Después de su uso, vaciar el depósito, limpiar la suciedad en el depósito y en el enchufe con un cepillo suave trapo, enjuague con agua. (Incluyendo todos los tubos).

-Coloque el soporte, el enchufe y todos los tubos en el compuesto desinfectante de tabletas Kanweida de (0,5g por tableta) en una concentración de 1:50, durante 1 hora.

-Limpie la superficie exterior con un trapo ligeramente húmedo ya con el desinfectante, y evite que cualquier líquido se filtre en la bomba.

-Mantenga la válvula de escape de aire limpia, sin contaminantes bloqueando el agujero de aire y afectando la eficiencia del escape.

6. Guía de Solución de problemas

Problema	Razón	Posible solución	Observación
Aspiración anormal o no hay aspiración	Conector suelto	1)Re-conectar	
	Fuga entre la botella y la tapa	2) Reemplazar la botella y la tapa o reemplazar el anillo de sello.	
	Enchufe suelto	3) Presione firmemente el enchufe.	
	Fuga en la unión del tubo de succión	4)Re-ajustar el tubo de succión	
	Fuga por la boca de succión	5)Limpie la pieza de la válvula de la boca de succión	

7. Condiciones ambientales de manejo:

Rango de temperatura ambiente: 5°C~40°C
 Humedad relativa: ≤80%
 Rango de presión Atmosférica: 0.086MPa~ 0.106MPa

8. Limitación de transporte y almacenamiento.

Rango de temperatura ambiente: 40°C~55°C
 Humedad relativa: ≤80%
 Rango de presión Atmosférica: 0.05MPa~0.106MPa

Nota: Se requiere para almacenar el aparato una habitación bien ventilada y sin gas corrosivo, y evitar cualquier choque violento durante la manipulación.

9. Lista de Accesorios.

Tubo de Succión 1 pieza
 F8 Tubo de Flema 1 pieza
 F12 Tubo de Flema 1 pieza

Estan sujetos a cualquier cambio en el diseño y tamaño sin previo aviso.

Póliza de Garantía		
Producto	Modelo	5. Los accesorios, refacciones, componentes y/o consumibles podrán ser adquiridos en Comercializadora Kelly S.A. de C.V. Fuentes de Pirámides, Ext.1, Int.604, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México. C.P.53950
.....	
Marca	No. de Serie	Situaciones No Cubiertas Por La Garantía
.....	
La presente garantía tiene vigencia por 1 año a partir de la fecha de entrega. Se extiende la presente en la Ciudad de el de del 20.....		1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. 3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
COMERCIALIZADORA KELLY S.A. DE C.V. Fuentes de Pirámides, Ext.1, Int.604, Lomas de Tecamachalco Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México. C.P.53950 Tel. 0155 3093 9090 y/o 01 800 087 0890		
Términos y Condiciones 1. Esta garantía ampara cualquier defecto de fabricación, piezas y componentes y mano de obra; siendo responsabilidad exclusiva de COMERCIALIZADORA KELLY S.A. DE C.V./HERGOM efectuar las revisiones correspondientes y/o ajustes que se requieran durante la vigencia de la póliza, a condición de que el personal de COMERCIALIZADORA KELLY S.A. DE C.V./HERGOM sea el único que intervenga para efectuar dichas intervenciones; liberando al consumidor por costos de reparación y mano de obra siempre y cuando sea defecto de fabricación y no por mal uso. 2. El consumidor se obliga a entregar el equipo dañado, motivo de ésta Póliza, el cual deberá estar completo y sin daños visibles. 3. Esta garantía ampara únicamente el producto arriba especificado. 4. Para validar dicha Póliza será necesario en todo caso, presentar esta garantía debidamente requisitada y sellada o factura de compra, en nuestro centro de servicio técnico ubicado en Poniente 125 A No.60 Col.Nueva Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México. C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales HERGOM Puebla, Cuadajajara o Monterrey con líneas de atención al 01 800 087 0890, quien será responsable de los gastos de transporte, para hacer efectiva esta garantía.		Nombre: Firma: Fecha de Entrega:
		



HERGOM[®]
ASPIRADORES