



CARACTERÍSTICAS

El producto está compuesto por lámina termoplástica, tejido textil

Resistente carcasa de plástico reforzado y montantes para apoyar y proteger al pie

Suela curva para mayor balance

Cintas de velcro ajustables

Soportes rígidos laterales

Almohadillas para mayor comodidad

Válvula reguladora

Cuenta con cámara hidráulica

Tamaño	Talla (MX)	Talla (USA)	Talla (EUR)	Bolsa de aire	Talla
FBS02S	2-4 / 22-24 cm	4-6	33.5-36.5	SI	CH
FBS02M	2-6 / 22-26 cm	4-8	33.5-39	SI	M
FBS02G	6-9 / 26-29 cm	8-11	39-42	SI	G
FBS02XC	9-10 / 29-30 cm	11-12	42-43	SI	XG

Válvula reguladora de aire, ajusta la presión de la bota según se requiera

Campos de aplicación:

1. Protección de fractura, crea estabilidad de la articulación del tobillo con fijación externa;
2. Protección fija para esguinces de tobillo de segundo y tercer grado;
3. Protección con fijación externa tras lesión del tendón de Aquiles.

Modo de Uso:

1. Debe usarse bajo la supervisión de un médico;
2. Afloje la correa de fijación, quite el bisel frontal, luego abra el forro;
3. Pon tus pie suavemente sobre el forro y fija el forro;
4. Coloque la válvula reguladora de aire que nivela la presión de la bota según se requiera y fije las correas a su vez;
5. Infle correctamente la válvula para que el dispositivo sea más cómodo de llevar.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452