





Pastillero Triturador PST-T2

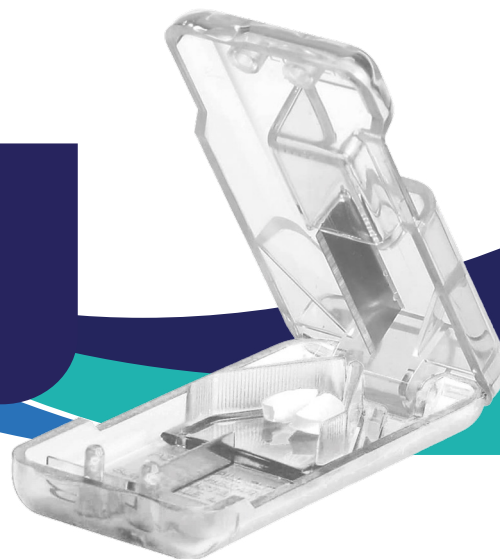

Cuenta con una bandeja dispensadora que captura la mitad de la pastilla para recuperarla fácilmente, mientras que una bandeja de sujeción interior mantiene la otra mitad de la pastilla segura para su uso posterior. La hoja afilada de acero inoxidable siempre hace un corte limpio y el soporte flexible en forma de V mantiene la pastilla en su lugar mientras corta.

Instrucciones de Uso :

- 1.- Lave antes del uso inicial con agua tibia y jabón, enjuague y deje secar completamente antes de usar. Repita entre usos y elimine residuos de la hoja con un paño grueso teniendo cuidado de no entrar en contacto con la hoja de corte.
- 2.-Coloque la píldora en el soporte en forma de V. (A)
- 3.-Cierre la tapa para cortar la pastilla.
- 4.-Retire la mitad cortada de la píldora de la bandeja dispensadora (B).
- 5.- Cuando se necesite la otra mitad de la píldora, abra la tapa y retírela de la bandeja de sujeción (C).
- 6.-Cierre la tapa y guárdelo en posición cerrada.

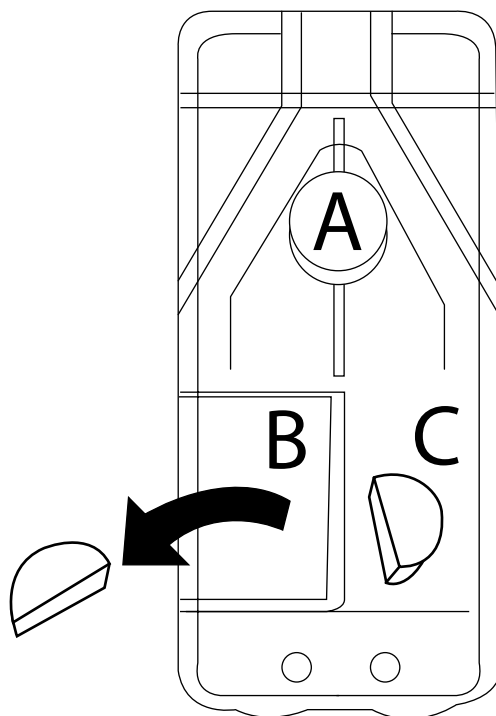

Advertencia



Este producto no es a prueba de niños ni es un juguete. Mantenga este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la cuchilla ya que esta muy afilada. Deseche el producto cuando la cuchilla ya no funcione de manera óptima. Tenga en cuenta que las cápsulas blandas o tabletas con recubrimiento entérico están diseñadas para tragarse enteras y nunca deben cortarse antes de tomarlas.