

ASPIRADOR PORTÁTIL CON BATERÍA RECARGABLE (18lt X min) 7E-D

“ La unidad de aspiración de secreciones portátil de última generación, ofrece una excelente solución a las necesidades médicas y del cuidado de la salud en el hogar, gracias a su diseño ultra ligero y silencioso, su batería recargable para completa movilidad y equipado con un sistema de lubricación libre de aceites y libre de mantenimiento con gabinete fabricado en PVC (resistente a la oxidación) Favorece el movimiento mucociliar, mejora la entrada y salida de aire y ayuda a evitar las infecciones pulmonares en el paciente. ”

CARACTERÍSTICAS

- Unidad de aspiración portátil.
- Gabinete elaborado de PVC de alta resistencia a oxidaciones.
- Presión regulable.
- Reloj indicador de potencia.
- Válvula de seguridad (para evitar el derrame de líquidos).
- Control de regulación de aspirador.
- Manguera de silicón de 2 mt.



Dos formas de alimentación:

- Unidad de poder: AC110V - 60Hz
- Batería recargable ≈ 2 ciclos de trabajo (30 min/ciclo máximo)



Sistema libre de mantenimiento



Ligero y compacto:
10kg / 54.5 x 37 x 31 cm



Sistema de fusibles intercambiables para batería recargable



Silencioso: Ruido menor a 65 Db (A)


DATOS TÉCNICOS

- Rango de aspiración: 0.75 Mpa - 0.02 Mpa.
*Equipo sensible a la presión atmosférica (podría no alcanzar su máxima capacidad de trabajo, bajo condiciones desfavorables).
- Capacidad de aspiración: 15~18 Lt / min.
- Batería recargable de ácido Plomo.
- Capacidad del frasco: 1000 ml.
- Equipo silencioso: Ruido Menor a 65 Db (A)
- Peso Bruto: 10 kg.
- Peso Neto: 7.6 kg.




SISTEMA DE FUSIBLES PARA BATERÍA RECARGABLE


1. Identifique la bolsa de fusibles "F3AL250V"

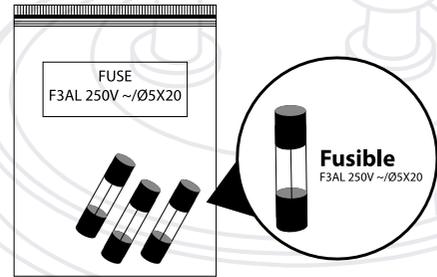


2. Voltee el equipo para visualizar el porta fusible con etiquetado "F3AL250V" en su base inferior.

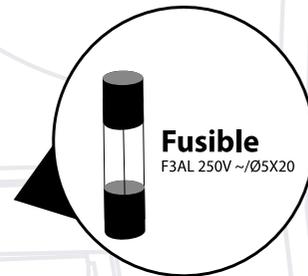

3. Desatornille el porta fusible y coloque el "F3AL250V" en el soporte, atornille de vuelta.

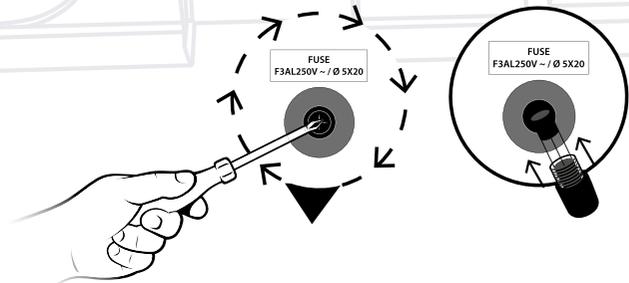

4. Su aspirador está listo para conectarse y cargar la batería de 2 ciclos.

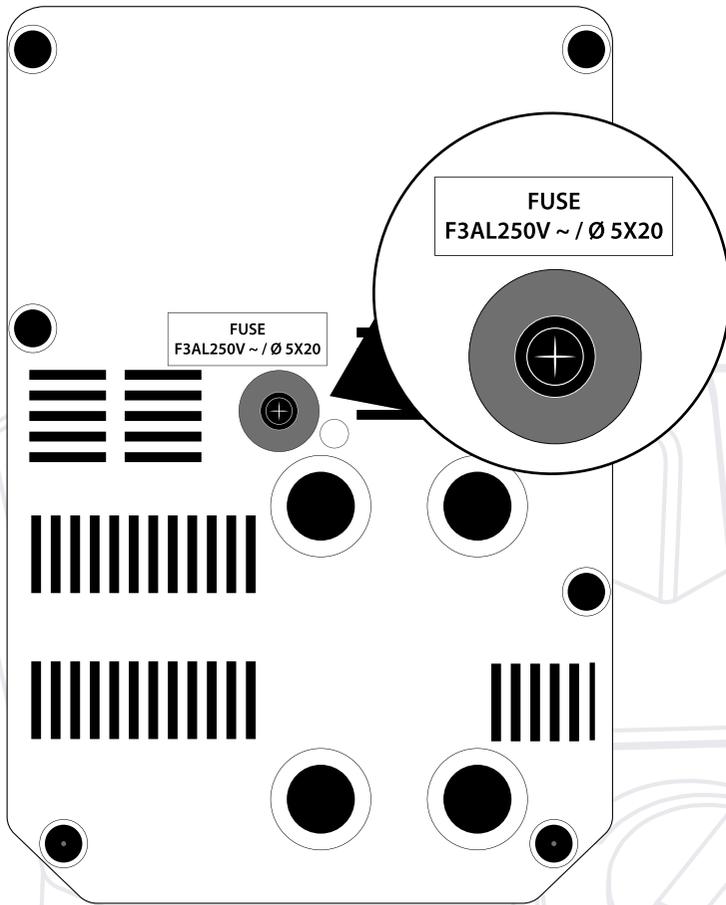

CONTENIDO

- Tubo de succión 2 m x 1 pza.
- Catéter de succión: (F8 / F12 niño / adulto.) x 2 pzas.
- Vaso de 1000 ml. x 1 pza.
- Tubo fusible "F15AL250V" x 2 piezas
- Tubo fusible "F3AL250V" x 3 piezas
- Filtro de aire x 2 pzas.
- Manual de usuario x 1 pza.
- Manual Fusibles x 1pza.

Fotografías meramente ilustrativas, diseño sujeto a errores y modificaciones sin previo aviso.

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

 @byHergom  5224482452