

ANDADERA PLEGABLE DE 1 BOTÓN CON RUEDAS DE 5" AN04A/AN04G

| CLAVE | COLOR |
|-------|-------|
| AN04A | AZUL |
| AN04G | GRIS |



Mecanismo de plegado con botón al centro



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:



Estructura de bastidor ligera hecha de tubo de aluminio.



Superficie de acero inoxidable.



Altura regulable.



Capacidad de carga 100 kg máx.



2 Patas traseras con 8 Niveles para ajustar la altura



2 Patas delanteras con ruedas de 5" de PVC




1. Mecanismo de plegado con botón al centro
2. Empuñaduras texturizadas
3. Refuerzos laterales
4. Lantas delanteras de 5" de PVC
5. Estructura de aluminio
6. 8 Niveles para ajustar la altura
7. Topes plásticos
8. Gomas antiderrapantes en patas traseras



PARA ALMACENAR
Deberá presionar el seguro del centro, después doblar hacia adentro cada uno de los laterales



76-93 cm

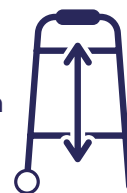

52cm



USO DEL PRODUCTO

El usuario debe ajustar las cuatro patas de la andadera según altura y peso.

La altura de la andadera es adecuada si el codo se endereza cuando se carga durante el uso, mientras está en la andadera se dobla ligeramente cuando se está de pie.

LIMPIEZA

1. Se puede limpiar con un líquido doméstico antiséptico.
2. Se puede limpiar con productos de limpieza neutros, desinfectantes y no agresivos de uso doméstico.
3. Después del lavado, enjuague con agua limpia y limpie con un paño seco.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A
#62 CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

