

ANDADERA REFORZADA PLEGABLE CON RUEDAS AN05A/AN05G

CLAVE	COLOR
AN05A	AZUL
AN05G	GRIS



Mecanismo de plegado con botón al centro



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:



Estructura de bastidor ligera, marco con diseño curvo, hecha de tubo de aluminio.



Superficie de acero inoxidable.



Altura regulable.



Capacidad de carga 133 kg máx.



Marco con diseño curvo




2 Patas delanteras con ruedas de 5" de PVC



PARA ALMACENAR
Deberá presionar el seguro del centro, después doblar hacia adentro cada uno de los laterales



78-93 cm

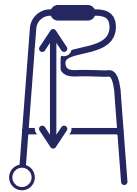

52cm



1. Mecanismo de plegado con botón al centro
2. Empuñaduras texturizadas
3. Refuerzos laterales
4. Llantas delanteras 5" de PVC
5. Estructura de aluminio
6. 5 Niveles para ajustar la altura en 2 patas traseras
7. Topes plásticos
8. Gomas antiderrapantes en patas traseras
9. Marco con diseño curvo

USO DEL PRODUCTO

El usuario debe ajustar las cuatro patas de la andadera según altura y peso.

La altura de la andadera es adecuada si el codo se endereza cuando se carga durante el uso, mientras está en la andadera se dobla ligeramente cuando se está de pie.

LIMPIEZA

1. Se puede limpiar con un líquido doméstico antiséptico.
2. Se puede limpiar con productos de limpieza neutros, desinfectantes y no agresivos de uso doméstico.
3. Después del lavado, enjuague con agua limpia y limpie con un paño seco.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452