


Destruccion de Agujas de Jeringas BD-310

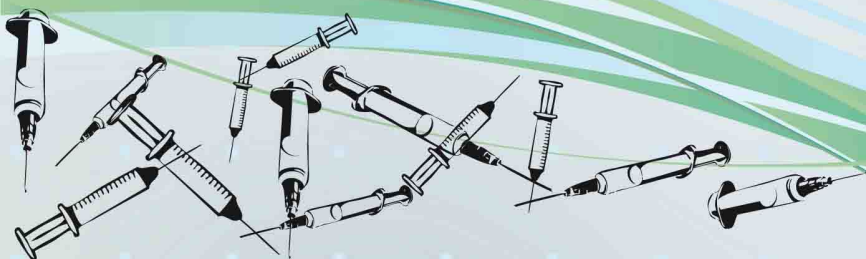

- * Práctico
- * Potente
- * Eficaz



Especificaciones:

- * Rápido y eficaz
- * Seguro y confiable
- * Destruye agujas de jeringa al instante
- * Eliminación total de cualquier rastro de infección latente
- * Vaporización de líquidos residuales durante el proceso de fusión
- * Equipado con cuchilla afilada en acero inoxidable para cortar la cabeza del cuerpo de la jeringa
- * Protección automática en caso de sobrecalentamiento, "Overlord"
- * Función "Ozone" para esterilizar el equipo después o antes de usarlo (una vez posicionado el switch en "Ozone", el proceso de esterilización se mantendrá activo mientras permanezca encendido el led de "Ozone")
- * Led indicativo de "compartimento lleno" (box full)
- * Amplia cajonera frontal para residuos, con sistema "Push-On"

Procedimiento de fusión:

1. Insertar la aguja en el orificio
2. Presionar suavemente
(las chispas emitidas durante el proceso son completamente normales e indican el contacto entre la aguja y los electrodos internos del destructor)
3. Esperar de 2 a 3 segundos para finalizar el proceso
4. Retirar la jeringa y colocarla en la cuchilla
5. Jalar la palanca para cortar el excedente de la jeringa
5. Liberar la cajonera de residuos y/o poner en marcha la función de "esterilización" del equipo (opcional)

Incluye:

- * Cable de alimentación
- * Cuchilla desmontable
- * 5 hojas afiladas de 64mm
- * 4 hojas afiladas de 24mm
- * 2 fusibles

Especificaciones técnicas:

Fuente de poder: 220V (110V) AC
Alimentación: Menor a 310VA
Temperatura de trabajo: +5°C~+40°C
Dimensiones: 196X230X140 mm
Peso: 2.36 Kg



Destroyer



No Infection

