

# CC01 Colchón de Presión Alternativa con sistema de burbujas

# Handy®

## ¡Sistema de burbujas!

El colchón de presión alterna CC01 está compuesto por burbujas de aire particularmente cómodas, ajustándose al cuerpo del paciente gracias al sistema de inflado alterno. Mantiene un alto rango de comodidad y contrarresta la aparición de llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas.

El colchón CC01 está diseñado para el tratamiento y prevención de lesiones, disminuye la sudoración, favorece la curación de las heridas y brinda máxima comodidad al paciente.

### Especificaciones:

#### Dimensiones:

Colchón (L x A x H) - 195cm x 88cm x 7.5cm

Extensiones (L x A) - 50cm x 88cm

Compresor (L x A x H) - 26cm x 13cm x 10cm

#### Peso:

Colchón - 2.3 kg

Compresor - 1.4 kg

#### Potencia:

AC110V/220V 50Hz/60Hz

#### Rango de presión:

50 a 105 mmHg

#### Caudal de aire:

4-6 litros / min

#### Material del colchón:

EN-71 PVC de grado médico

#### Grosor del colchón:

0,35 mm

#### Resistencia al frío:

-30 Grados



### Funcionamiento:

Las burbujas de aire cuentan con un sistema de inflado alternado con un ciclo de 6 minutos.



Mientras las burbujas representadas en color azul se mantienen infladas, la otra mitad de las burbujas representadas en color verde permanecen desinfladas.



Posteriormente el proceso se invierte, inflándose las burbujas representadas en color verde, alternándose el ciclo cada 6 minutos.

