

 **CheckATek** by   
WE CARE ABOUT YOU

# OTOSCOPIO UNIVERSAL D-100



## INDICACIONES DE USO Y CONTENIDO

Es un placer para nosotros que usted haya decidido adquirir un producto de nuestra colección.


Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y cuidado del otoscopio

Contenido:

- 1 Otoscopio
- 6 Espéculos
- 1 Estuche

Instrucciones:


\*6 Espéculos auriculares de diferentes diámetros.

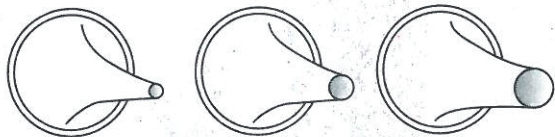



Nota:

Los espéculos deberán ser esterilizados con agua hirviendo o en autoclave en cuyo caso la temperatura no deberá exceder a los 117°C así mismo podrán desinfectar en frío en las concentraciones normales usadas para la esterilización de instrumentos médico.


Lupa removible integrada  
a la cabeza del otoscopio

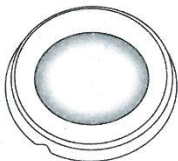

\*Para reemplazar el foco del otoscopio retire el espejuelo, desatornille el foco dañado y atornille uno nuevo en la cabeza del otoscopio.

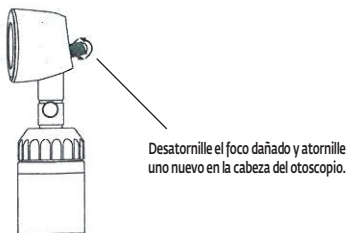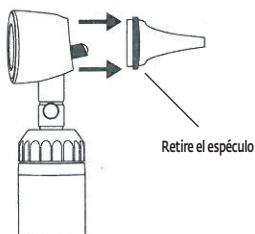

Perilla para control de intensidad de luz en la parte superior; gire gradualmente en sentido contrario a las manecillas del reloj y reducirá la intensidad de la luz hasta apagarse o bien, gire al sentido del reloj y gradualmente aumentará la luz hasta su máxima intensidad,

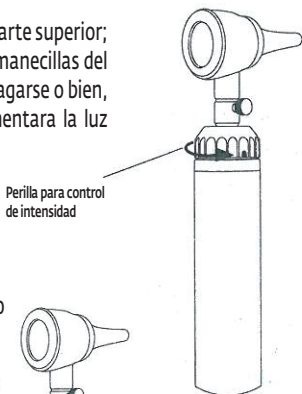

Cuenta con un mango estándar liso de plástico para almacenar 2 pilas tipo C de 1.5 volts,





**COMERCIALIZADORA KELLY S.A. DE C.V.**  
**Fuentes de Piramides, Ext.1, Int.604, Lomas de Tecamachalco**  
**Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, México D.F. C.P.53950**  
**Tel. 0155 3093 9090 y/o 01 800 087 0890**

**WWW.HERGOM-MEDICAL.COM**

