

ESTETOSCOPIO SIMPLE

Póliza de Garantía

Producto Modelo

Marca No. de Serie

La presente garantía tiene vigencia por 1 año a partir de la fecha de entrega. Se extiende la presente en la Ciudad de el de del 20.....

IMPORTACIONES HERGOM Y/O HERRERA GÓMEZ, JULIO ALBERTO
Norte 72 No.6008 Col. Aragón Inguarán, Del. Gustavo A. Madero,
México, Distrito Federal, C.P. 07820
Tel. 0155 3093 9090 y/o 01 800 087 0890

Términos y Condiciones

1. Esta garantía ampara cualquier defecto de fabricación, o mano de obra; siendo responsabilidad exclusiva de IMPORTACIONES HERGOM Y/O HERRERA GÓMEZ, JULIO ALBERTO/HERGOM efectuar las revisiones correspondientes y/o ajustes que se requieran durante la vigencia de la póliza, a condición de que el personal de IMPORTACIONES HERGOM Y/O HERRERA GÓMEZ, JULIO ALBERTO/HERGOM sea el único que intervenga para efectuar dichas intervenciones; liberando al consumidor por costos de reparación y mano de obra siempre y cuando sea defecto de fabricación y no por mal uso.
2. Esta garantía excluye expresamente el desgaste natural de la mercancía, daños producidos en su conexión deficiente, operación inadecuada por negligencia del comprador, así como los daños causados por agentes externos de carácter químico o electroquímico imputables al consumidor. Se excluyen además indemnizaciones por perjuicios y daños a terceros, así como cualquier gasto de transportación que este implique.
3. Tampoco se cubren los defectos causados por accidentes o fuerza mayor, descargas eléctricas y alteraciones o reparaciones realizadas en lugares NO autorizados.
4. Dado el caso, según causas de la analítica total de la presente garantía.
5. El consumidor se obliga a entregar el equipo dañado, motivo de ésta Póliza, el cual deberá estar completo y sin daños visibles.
6. Esta garantía ampara únicamente el producto arriba especificado.

5. Para validar dicha Póliza será necesario en todo caso, presentar esta garantía debidamente requisitada y sellada o factura de compra, en nuestro centro de servicio técnico ubicado en Poniente 126 A No.60 Col.Nueva Vallarta, Del. Gustavo A. Madero, México D.F. C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales HERGOM Puebla, Guadalajara o Monterrey con línea de atención al 01 800 087 0890, quien será responsable de los gastos de transportación, para hacer efectiva esta garantía.

Situaciones No Cubiertas Por La Garantía

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Nombre:

Firma:

Fecha de Entrega:



Hergom Medical
www.hergom-medical.com

CheckATek

WE CARE ABOUT YOU

INSTRUCTIVO

MONTAJE Y SUSTITUCIÓN DEL DIAFRAGMA

Usando la yema de los dedos, aplique una pequeña cantidad de polvos de talco en la superficie interior del borde del diafragma. Esto facilitará el montaje y mantendrá la alternancia de frecuencia alta/baja suave y silenciosa. Golpee el diafragma con los dedos para eliminar el exceso de talco.



Inserte el diafragma en el anillo con rosca que sujetará al diafragma colocando la parte legible del diafragma sobre el borde interno del anillo.

Examine visualmente el diafragma para asegurar que el borde esté perfectamente colocado dentro del anillo.



Para acoplar el conjunto anillo/diafragma en la campana, coloque el anillo con la rosca verificando Inspeccione visualmente el borde del anillo y verifique que este quede horizontal.



Enrolle lentamente el aro alrededor del borde de la campana usando ambos pulgares, moviéndose en direcciones opuestas alrededor de la campana.

Inspeccione visualmente el borde donde el diafragma engancha con el aro para que quede uniforme. Pueden realizarse pequeños ajustes tirando ligeramente y enrollando el aro lejos del diafragma, permitiendo que el diafragma deslice en posición.



¡FELICIDADES!

Para grupo HERGOM es un placer que usted haya adquirido uno de nuestros exclusivos estetoscopios simples.

HERGOM es sinónimo de servicio calidad y precio.

Sírvase de leer detenidamente las presentes instrucciones para su cuidado y uso adecuado.

Les saluda cordialmente
Su equipo HERGOM.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este estetoscopio cuenta con un diafragma y un aro aislante para evitar que el paciente sienta frío, un excelente aislamiento acústico y un ajuste suave y agradable gracias a las olivas de inserción ajustada en los oídos y cierre hermético, así como el aro metálico con un ángulo automáticamente correcto. Además, el tubo está disponible en una amplia gama de colores con el fin de satisfacer las preferencias individuales.

Sin embargo, debe saber que, por encima de todo, los estetoscopios **CHECKATEK** son garantía de superioridad acústica, diseño innovador y rendimiento excepcional.



Distribuido por Julio Alberto Herrera Gómez
Norte 72 No.6008
Col. Aragón Inguaran
México, Distrito Federal, C.P.07820
Teléfonos: 0155 3093 9090 y 01800 087 0890

Fabricado por China Meheco Medical
Instruments &
Surgical Dressings Import and Export
Corporation
18 Guangming Zhong Jie Chongwen
District Beijing 100061 China



Hergom Medical
www.hergom-medical.com

COMÓ RETIRAR EL DIAFRAGMA Y LIMPIAR LA CAMPANA



Con el lado del diafragma hacia arriba, tome el aro con los dedos pulgar e índice de ambas manos y enrolle el borde de la campana. Retire el diafragma del aro y limpie los componentes en agua jabonosa o páseles un paño con alcohol. Las superficies de la campana pueden limpiarse con alcohol. Las superficies de la campana pueden limpiarse con alcohol o agua jabonosa. Seque todos los componentes y superficies totalmente antes de volver a montarlas.

USO Y MANTENIMIENTO GENERAL

- *Evite el calor y el frío extremos, los solventes y los aceites.
- *Todo el estetoscopio se puede limpiar con un paño húmedo con alcohol o agua jabonosa.
- *Las olivas pueden retirarse de los tubos metálicos para limpiarse mejor.

NOTA. No sumerja el estetoscopio en ningún líquido ni lo someta a esterilización de vapor. Si se requiere desinfección, se puede usar en el estetoscopio un paño impregnado con una solución de alcohol isopropílico con una solución de alcohol isopropílico al 70%.


AJUSTE DEL ARCO METÁLICO

El estetoscopio está diseñado para que el ajuste en el oído sea cómodo y esté aislado acústicamente. Los tubos están diseñados para ajustarse a la anatomía de los canales auditivos.



Las olivas deben apuntar en la dirección en que se insertan en los canales auditivos. Para reducir la tensión del muelle sobre los auriculares, sujete cada tubo por la curva próxima a la oliva y sepárelos gradualmente hasta que se abran por completo.

Para aumentar la tensión del arco, cójalo con una mano por donde los tubos auditivos entran en el tubo de plástico y apriete hasta que el tubo de plástico en un tubo auditivo toque con otro. Repita la operación si es necesario.

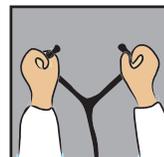

Los estetoscopios de la marca **CHECKATEK** utilizan un diseño único para conectar las olivas a un aro metálico. Las olivas se empujan en el extremo del tubo metálico y se insertan firmemente en su sitio. Para retirarlas, tire firmemente de cada oliva.

