

Fith

ESTADÍMETRO PORTÁTIL MED01. MEDIDOR DE ALTURA CON CINTA MÉTRICA RETRÁCTIL. 2 METROS

Características

- Ideal para medir la altura en casa, desde niños hasta adultos.
- Compacto, liviano y ahorro de espacio.

Cómo instalar

1. Elija un lugar plano vertical y horizontalmente.
2. Coloque la base de medición en el suelo.
3. Estire la banda de metal de la varilla hasta que su escala indique '0' (cero).
4. Marque la posición y fije con tornillos.

Especificaciones

- Rango: 0~200 cm.
- Graduaciones: 1 mm.
- Material: plástico, correa de metal.
- Incluye 3 tornillos y una cinta de doble cara.

