

ANDADERA MÉDICO PLEGABLE DE 2 BOTONES AN02A/AN02G

CLAVE	COLOR
AN02A	AZUL
AN02G	GRIS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:



Estructura de bastidor extra ligera hecha de tubo de aluminio.



Superficie de acero inoxidable.



Altura regulable.



Capacidad de carga 100 kg y 150 kg máx.



Mecanismo de plegado con doble botón



Gomas antiderrapantes





4 Patas con 8 Niveles para ajustar la altura





PARA ALMACENAR

Deberá presionar los seguros de los dos extremos para después doblar hacia adentro cada uno de los laterales

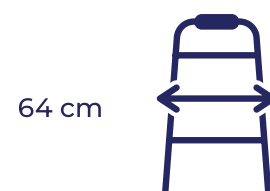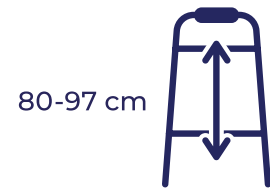

1. Mecanismo de plegado con doble botón
2. Empuñaduras texturizadas
3. Refuerzos laterales
4. Regatones o gomas antiderrapantes
5. Estructura de aluminio extruido
6. 8 Niveles para ajustar la altura
7. Topes plásticos

USO DEL PRODUCTO

El usuario debe ajustar las cuatro patas de la andadera según altura y peso.

La altura de la andadera es adecuada si el codo se endereza cuando se carga durante el uso, mientras está en la andadera se dobla ligeramente cuando se está de pie.

LIMPIEZA

1. Se puede limpiar con un líquido doméstico antiséptico.
2. Se puede limpiar con productos de limpieza neutros, desinfectantes y no agresivos de uso doméstico.
3. Después del lavado, enjuague con agua limpia y limpie con un paño seco.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A
#62 CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

