

Póliza de garantía

Si tiene alguna duda respecto a su garantía, puede consultar los términos de su garantía en el siguiente apartado:

Póliza de Garantía

Producto: Modelo:

Marca: No. de Serie:

La presente garantía tiene vigencia por un año a partir de la fecha de entrega. Se extiende a la presente en la ciudad de del 20.....

COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V.
 Poniente 238, No. 19, Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México.

Tel. 55 3093 9090 / 0 800 087 0890

Términos y Condiciones

1. Esta garantía ampara cualquier defecto de fabricación, piezas y componentes y mano de obra, siendo responsable exclusiva de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HANDY, al firmar las revisiones correspondientes y/o ajustes que se requieran durante la vigencia de la póliza, a condición de que el personal de mantenimiento y/o el usuario se abstenga de realizar cualquier tipo de modificaciones, reparaciones o mejoras al producto, al contar con el manual de instrucciones y/o manuales de mantenimiento que se entregan con el producto.

2. El consumidor se obliga a entregar el equipo defectuoso, motivo de esta Póliza, el cual deberá estar completo y sin otros daños.

3. El personal de mantenimiento del producto revisará y especificará:

4. Una lista de partes que se requieran para la reparación, en caso de que el producto sea reparado, de acuerdo a la garantía de fábrica o factura de compra, en nuestro centro de servicio técnico ubicado en Poniente 238-A, No.65, Col. Nueva Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México, C.P. 07750 o en cualquier de nuestras sucursales.

5. El costo de envío y operación logística para llevar a cabo el proceso de garantía.

6. El costo de envío y operación logística para llevar a cabo el proceso de garantía.

7. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

8. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

9. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

10. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

11. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

12. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

13. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

14. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

15. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

16. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

17. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

18. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

19. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

20. Cuando el producto haya sido reparado para ser devuelto al usuario.

Nombre:

Firma:

Fecha de Entrega:

Sello de Validez



Manual de usuario

Silla de ruedas Basic S100E

2. Cuando se encuentre usando la silla y requiera tomar algún objeto a su alcance (por ejemplo: de lado delantero de la silla de ruedas, hacia ambos lados o detrás del costado), asegúrese de que el peso del usuario este en equilibrio, para evitar volcaduras de la silla.

3. Antes de utilizar la silla de ruedas, compruebe el estado de los reposabrazos y el agarre de las llantas, verifique que no se encuentren flojos; de lo contrario realice el ajuste de los mismos antes de usarla.

4. Tenga cuidado con su silla de ruedas, especialmente en las pendientes. Cuando la silla de ruedas se use en un terreno inclinado, asegúrese de que el peso del paciente este bien distribuido y su postura sea segura, así como del ángulo de inclinación del suelo sea inferior a 10 grados. Cuando el ángulo de inclinación sea mayor a 10 grados, por seguridad del usuario, este deberá ser trasladado con el apoyo de al menos 2 personas.

5. Cuando el usuario se incline a recoger algún objeto del suelo, se recomienda tener cuidado de que la rodilla no presione el pecho para evitar posibles lesiones.

6. Al usar la silla NO cambie la postura de su cuerpo mientras la silla se encuentre inclinada; para evitar que la silla se vuelque.

7. El dispositivo para asegurar las ruedas de la silla no es un dispositivo de freno durante la marcha, evite utilizar el dispositivo de aseguramiento de la rueda, para detener la silla de ruedas en movimiento.

8. Al usar la silla de ruedas no suba ni baje escaleras sin el apoyo de 1 o 2 personas auxiliares.

9. La silla de ruedas modelo S100B ha sido diseñada para emplearse en terreno plano, al encontrar algún obstáculo o irregularidad le sugerimos evitar este terreno para evitar la inclinación de la silla de ruedas. Cuando el usuario use la silla de ruedas por sí mismo, le recomendamos mantenerse en terreno uniforme y la velocidad de conducción recomendada debe mantenerse entre 3 y 5 km/h

10. La silla de ruedas no debe usarse en escaleras mecánicas, de lo contrario, causará lesiones personales graves.

Estructura principal

Las sillas de ruedas HANDY BASIC S100B se componen principalmente de marco principal, puntal, soporte para piernas, reposabrazos, reposapiés, llanta delantera de cañuela con rin de plástico, llanta trasera con rin de metal, frenos laterales y almohadillas de respaldo y asiento. El marco de la silla de ruedas está hecho de acero, el asiento y el cojín del respaldo están fabricados en PVC. Las ruedas delanteras son de plástico sólido.

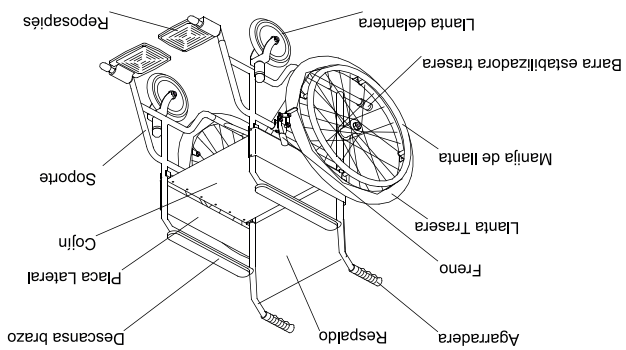


Diagrama de estructura que se muestra en la Figura 1.

Uso sugerido

La silla de ruedas HANDY BASIC S100B está diseñada para ser utilizada por inmovilizados y/o ancianos en instalaciones de salud o como medio de transporte minusválidos o personas con capacidades especiales, pacientes parcialmente inmovilizados y/o ancianos en instalaciones de salud o como medio de transporte

Precaciones, advertencias y consejos

1. A menos que se tenga una indicación especial, todos los ajustes o pruebas de la silla deberán realizarse sin el usuario.

11. Cuando el usuario necesite trasladarse de la silla de ruedas a otro lugar, primero debe detener la silla de ruedas en un buen ambiente, con la rueda delantera dirigida hacia la posición que necesita moverse, y verificar que la silla de ruedas ya está bloqueada con los mecanismos de las llantas traseras.

12. Cuando transporte la silla de ruedas, sujétela de la estructura fija de la silla de ruedas, no la cargue de las partes móviles, por ejemplo, el reposabrazos, el reposapiés, etc.

13. Por favor, evite ponerse de pie sobre los reposapiés, asegúrese de plegarlos antes de que el usuario se ponga de pie. El usuario no debe pararse sobre el reposapiés durante el uso para evitar que la silla de ruedas vuelque.

14. Cuando use la silla en terrenos en pendiente, no cambie repentinamente de dirección ni frene repentinamente para evitar lesiones.

15. La capacidad máxima de la silla de ruedas es de 100 kg, emplear la silla para un peso superior es causa de nulidad de garantía.

16. Cuando use la silla de ruedas, límpiela una vez a la semana. Realice labores de mantenimiento y verificación de forma periódica para asegurar el buen funcionamiento de la silla.

17. Después de que el producto sea desechado, comuníquese con el departamento especializado en recuperar el dispositivo médico para su reciclaje a fin de evitar la contaminación ambiental.

Después de que el producto sea desechado, comuníquese con el departamento especializado en recuperar el dispositivo médico para su reciclaje a fin de evitar la contaminación ambiental.

Instrucciones de uso

Tipo de base Modo de uso de silla de ruedas

- Al elegir su silla de ruedas le recomendamos tener en cuenta las sugerencias de medidas y peso del usuario que se encuentran en la Tabla 1.

03

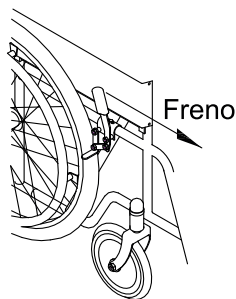


Figura 3

- La silla de ruedas cuenta con una barra estabilizadora trasera, para subir a un terreno elevado o una plataforma de baja altura deberá inclinar la silla apoyándose en la barra estabilizadora de modo que la silla de ruedas se incline hacia atrás y la rueda delantera pueda ascender al escalón, y una vez apoyadas ambas ruedas delanteras podrá impulsar la silla para subir (Figura 4).

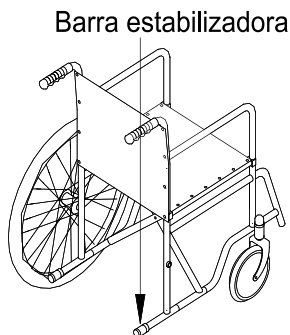


Figura 4

- Cuando necesite subir y bajar escalones, primero ayude al usuario a subir y bajar de los escalones, y luego mueva la silla de ruedas.

05

- La capacidad de la silla de ruedas es de 100 kg, cuando el usuario supere los 100 kg, o se requiera usar en terreno irregular (por ejemplo no pavimentado) comuníquese con el fabricante

Tabla 1 Comparación de peso y tamaño del asiento

Peso del Usuario kg	Ancho del asiento cm	Capacidad peso kg	Ancho del asiento cm
Niños o menos de 30 kgs	35	30~55	41
55~75	46	75~100	52

- Para abrir la silla de ruedas, deberá realizar presión en los dos laterales del asiento, la silla de ruedas se puede abrir fácilmente. Para plegar la silla, suba o pliegue los reposapiés y levante el cojín del asiento (Figura 2).

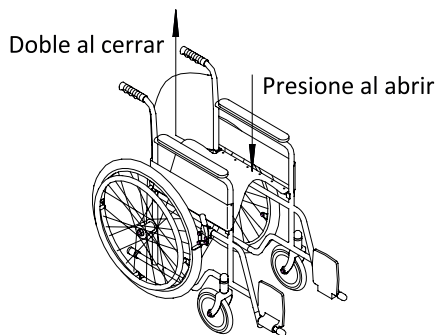


Figura 2.

- Hay dos frenos en ambas placas laterales, cuando se detenga, asegúrese de bloquear las ruedas traseras asegurando el freno (Figura 3).

04

Mantenimiento del producto y métodos de mantenimiento

- El adecuado cuidado de sillas de ruedas puede extender la vida útil de la misma.

- Limpie la estructura de forma regular con un paño suave y limpio
- Limpie de forma regular las llantas para evitar oxidación de la estructura.
- Cada 3 a 6 meses o después de ser expuesta a agua o entornos de gran presencia de humedad lubrique todas las partes rotativas, esto para garantizar una rotación fluida y segura.
- En entornos hospitalarios se recomienda desinfectar la silla cada vez que realice el cambio de paciente para evitar contaminación cruzada.

- Los usuarios de llantas neumáticas deben prestar atención para mantener la presión adecuada en las llantas, de lo contrario se verá reducida la vida útil de las llantas.

- La silla de ruedas S100B cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fábrica a partir de la fecha de la compra del original.

- Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- Piezas de desgaste o consumibles.
- Daños causados por una manipulación o transporte inadecuados o deficientes.
- Daños debidos a factores humanos como caídas o daños causados por colisión;

Condiciones y métodos especiales de almacenamiento

- Las sillas de ruedas S100B deberán almacenarse en interiores ventilados, secos, frescos, alejados del calor, evitando agentes corrosivos.
- El transporte debe realizarse en entorno de baja humedad sin condensación, evitar la luz, alejado del calor.

06