

Fith

By **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

ESTADÍMETRO PORTATIL CON CINTA RETRACTIL 2 METROS. MED01.



Manual Usuario

Modelo: MED01
Rango: 0-200 cm
Graduaciones: 1 mm
Material: plástico, correa de metal.

Contenido

1. Introducción
2. Especificaciones
3. Características
4. Cómo instalar
5. Garantía

Introducción

- El estadímetro portátil montable en pared modelo MED01 ayuda a la medición de estatura de pacientes y familiares.
- Es fácil de usar
- La varilla de altura montable en pared modelo MED01 es ampliamente aplicable para su uso en hospitales, clínicas, escuelas, negocios y áreas deportivas, así como el hogar.

2. Especificaciones

Modelo	MED01
Rango de Medida	0~200 cm
Graduaciones	1 mm
Material	Plástico, correa de metal
Contenido	3 tornillos, 1 cinta doble cara

3. Características

1. Ideal para medir la estatura de niños y adultos en todos los ámbitos, en el hogar, hospitales, clínicas, escuelas, negocios y áreas deportivas.
2. Compacto y ligero, ahorro de espacio

4. Cómo instalar

- 1) Elija un lugar plano vertical y horizontalmente.
- 2) Coloque la base de medición en el suelo.
- 3) Estire la banda de metal de la varilla hasta que su escala indique '0' (cero)
- 4) Marque la posición y fije con tornillos.
- 5) Viene con 3 tornillos y una cinta de doble cara en una caja original.

5. Garantía

Verifica nuestra política de garantías y devoluciones, enviando un correo a servicioalcliente@hergom-medical.com o al teléfono 800 087 0890 ext. 107 ó 55 3093 9090.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452