

## Póliza de garantía

Si tiene alguna duda respecto a su garantía, puede consultar los términos de su garantía en el siguiente apartado:

<b>Póliza de Garantía</b>	
Producto	Modelo
Marca	No. de Serie
La presente garantía tiene vigencia por 1 año a partir de la fecha de entrega. Se extiende la presente en la Ciudad de ..... del 20.....	
<b>COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V.</b> Pionteiente 128, No. 19, Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México. Tel.: 55 3993 9090 y/o 800 087 0890	
<b>Términos y Condiciones</b> 1. Esta garantía ampara cualquier defecto de fabricación, piezas y componentes y mano de obra, siendo responsable el fabricante de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V. HERGOM. Efectuar las revisiones correspondientes y/o ajustes que se requieran durante la vigencia de la póliza, a condición de que el personal de mantenimiento de la silla sea el mismo que el personal de mantenimiento de la silla original. 2. No se garantiza el uso de la silla en terrenos irregulares, resaca de caminos, caminos de tierra, etc. 3. El usuario deberá conservar el producto en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 4. El usuario deberá conservar el producto en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 5. El usuario deberá conservar el producto en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 6. El usuario deberá conservar el producto en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 7. El usuario deberá conservar el producto en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 8. El usuario deberá conservar el producto en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 9. El usuario deberá conservar el producto en buenas condiciones de uso y mantenimiento.	
<b>Situaciones No Cubiertas Por La Garantía</b> 1. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas. 2. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas. 3. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas. 4. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas. 5. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas. 6. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas. 7. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas. 8. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas. 9. Cuando el producto sea utilizado en condiciones diferentes a las previstas.	
Nombre: .....	Sello de Validez
Firma: .....	
Fecha de Entrega: .....	



Manual de usuario

# Silla de ruedas Basic S150N

2. Cuando se encuentre usando la silla y requiera tomar algún objeto a su alcance (por ejemplo: de lado delantero de la silla de ruedas, hacia ambos lados o detrás del costado), asegúrese de que el peso del usuario este en equilibrio, para evitar volcaduras de la silla.
3. Antes de utilizar la silla de ruedas, compruebe el estado de los reposabrazos y el agarre de las llantas, verifique que que no se encuentren flojos; de lo contrario realice el ajuste de los mismos antes de usarla.
4. Tenga cuidado con su silla de ruedas, especialmente en las pendientes. Cuando la silla de ruedas se use en un terreno inclinado, asegúrese de que el peso del paciente este bien distribuido y su postura sea segura, así como del ángulo de inclinación del suelo sea inferior a 10 grados. Cuando el ángulo de inclinación sea mayor a 10 grados, por seguridad del usuario, este deberá ser trasladado con el apoyo de al menos 2 personas.
5. Cuando el usuario se incline a recoger algún objeto del suelo, se recomienda tener cuidado de que la rodilla no presione el pecho para evitar posibles lesiones.
6. Al usar la silla NO cambie la postura de su cuerpo mientras la silla se encuentre inclinada; para evitar que la silla se vuelque.
7. El dispositivo para asegurar las ruedas de la silla no es un dispositivo de freno durante la marcha, evite utilizar el dispositivo de aseguramiento de la rueda, para detener la silla de ruedas en movimiento.
8. Al usar la silla de ruedas no suba ni baje escaleras sin el apoyo de 1 o 2 personas auxiliares.
9. La silla de ruedas modelo S100B ha sido diseñada para emplearse en terreno plano, al encontrar algún obstáculo o irregularidad le sugerimos evitar este terreno para evitar la inclinación de la silla de ruedas. Cuando el usuario use la silla de ruedas por sí mismo, le recomendamos mantenerse en terreno uniforme y la velocidad de conducción recomendada debe mantenerse entre 3 y 5 km/h
10. La silla de ruedas no debe usarse en escaleras mecánicas, de lo contrario, causará lesiones personales graves.

## Precaciones, advertencias y consejos

La silla de ruedas HANDY BASIC S100B está diseñada para ser utilizada por minusválidos o personas con capacidades especiales, pacientes parcialmente inmovilizados y/o anclados en instalaciones de salud o como medio de transporte

## Uso sugerido

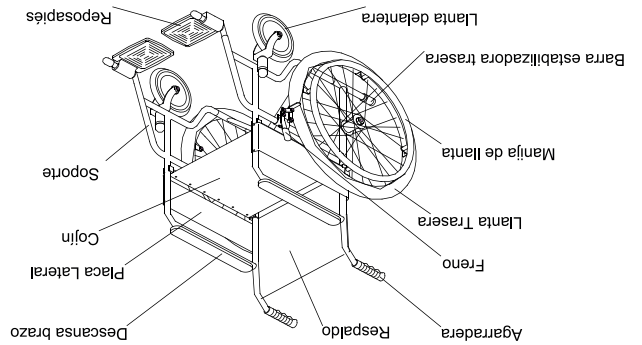


Diagrama de estructura que se muestra en la Figura 1.

Las sillas de ruedas HANDY BASIC S100B se compone principalmente de marco principal, puntal, soporte para piernas, reposabrazos, reposapiés, lanta delantera de cañuela con rin de plástico, lanta trasera con rin de metal, frenos laterales y almohadillas de respaldo y asiento. El marco de la silla de ruedas esta hecho de acero, el asiento y el cojín del respaldo están fabricados en PVC. Las ruedas delanteras son de plástico sólido.

## Estructura principal

11. Cuando el usuario necesite trasladarse de la silla de ruedas a otro lugar, primero debe detener la silla de ruedas en un buen ambiente, con la rueda delantera dirigida hacia la posición que necesita moverse, y verificar que la silla de ruedas ya está bloqueada con los mecanismos de las llantas traseras.

12. Cuando transporte la silla de ruedas, sujétela de la estructura fija de la silla de ruedas, no la cargue de las partes móviles, por ejemplo, el reposabrazos, el reposapiés, etc.

13. Por favor, evite ponerse de pie sobre los reposapiés, asegúrese de plegarlos antes de que el usuario se ponga de pie. El usuario no debe pararse sobre el reposapiés durante el uso para evitar que la silla de ruedas vuelque.

14. Cuando use la silla en terrenos en pendiente, no cambie repentinamente de dirección ni frene repentinamente para evitar lesiones.

15. La capacidad máxima de la silla de ruedas es de 100 kg. Emplear la silla para un peso superior es causa de nulidad de garantía.

16. Cuando use la silla de ruedas, límpiela una vez a la semana. Realice labores de mantenimiento y verificación de forma periódica para asegurar el buen funcionamiento de la silla.

17. Después de que el producto sea desechado, comuníquese con el departamento especializado en recuperar el dispositivo médico para su reciclaje a fin de evitar la contaminación ambiental.

*Después de que el producto sea desechado, comuníquese con el departamento especializado en recuperar el dispositivo médico para su reciclaje a fin de evitar la contaminación ambiental.*

## Instrucciones de uso

Tipo de base Modo de uso de silla de ruedas

1. Al elegir su silla de ruedas le recomendamos tener en cuenta las sugerencias de medidas y peso del usuario que se encuentran en la Tabla 1.

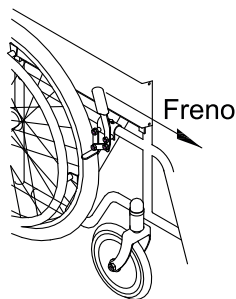


Figura 3

5. La silla de ruedas cuenta con una barra estabilizadora trasera, para subir a un terreno elevado o una plataforma de baja altura deberá inclinar la silla apoyándose en la barra estabilizadora de modo que la silla de ruedas se incline hacia atrás y la rueda delantera pueda ascender a al escalón, y una vez apoyadas ambas ruedas delanteras podrá impulsar la silla para subir (Figura 4).

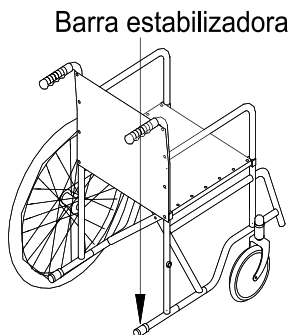


Figura 4

6. Cuando necesite subir y bajar escalones, primero ayude al usuario a subir y bajar de los escalones, y luego mueva la silla de ruedas.

2. La capacidad de la silla de ruedas es de 100 kg, cuando el usuario supere los 100 kg, o se requiera usar en terreno irregular (por ejemplo no pavimentado) comuníquese con el fabricante

Tabla 1 Comparación de peso y tamaño del asiento

Peso del Usuario kg	Ancho del asiento cm	Capacidad peso kg	Ancho del asiento cm
Niños o menos de 30 kgs	35	30~55	41
55~75	46	75~100	52

3. Parar abrir la silla de ruedas, deberá realizar presión en los dos laterales del asiento, la silla de ruedas se puede abrir fácilmente. Para plegar la silla, suba o pliegue los reposapiés y levante el cojín del asiento (Figura 2).

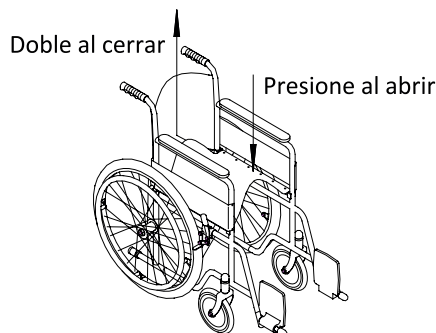


Figura 2.

4. Hay dos frenos en ambas placas laterales, cuando se detenga, asegúrese de bloquear las ruedas traseras asegurando el freno (Figura 3).

## Mantenimiento del producto y métodos de mantenimiento

1 El adecuado cuidado de sillas de ruedas puede extender la vida útil de la misma.

- Limpie la estructura de forma regular con un paño suave y limpio
- Limpie de forma regular las llantas para evitar oxidación de la estructura.
- Cada 3 a 6 meses o después de ser expuesta a agua o entornos de gran presencia de humedad lubrique todas las partes rotativas, esto para garantizar una rotación fluida y segura.
- En entornos hospitalarios se recomienda desinfectar la silla cada vez que realice el cambio de paciente para evitar contaminación cruzada.

2 La silla de ruedas S100B cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fábrica a partir de la fecha de la compra del original.

3 Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- Piezas de desgaste o consumibles.
- Daños causados por una manipulación o transporte inadecuados o deficientes.
- Daños debidos a factores humanos como caídas o daños causados por colisión;

## Condiciones y métodos especiales de almacenamiento

- Las sillas de ruedas S100B deberán almacenarse en interiores ventilados, secos, frescos, alejados del calor, evitando agentes corrosivos.
- El transporte debe realizarse en entorno de baja humedad sin condensación, evitar la luz, alejado del calor.