

Importado y Distribuido en México por:
COMERCIALIZADORA KELLY S.A. DE C.V.
 Fuentes de Pirámides No.1, Int.604,
 Lomas de Tecamachalco Sección Fuentes,
 Naucalpan de Juárez, C.P. 53950 Estado de México,
 México (Domicilio Fiscal)

Fabricado por:
BEIJING HERGOM INTERNATIONAL BUSINESS CO. LTD.
 No.5-103, Building 16, San Feng Li, Chaoyang District, Beijing, 100020 China

Servicio técnico:
HERGOM MATRIZ
 Poniente 126 A No. 62 Col. Nueva Vallejo,
 Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México C.P. 07750
 Telefonos.: 01 (55) 3093 9090

Visite nuestra página en:
www.hergom-medical.com



CC01
 Colchón de Presión
 Alterna
 con sistema de burbujas

MANUAL DE USUARIO



Póliza de Garantía

Producto Modelo

Marca No. de Serie

La presente garantía tiene vigencia por 1 año a partir de la fecha de entrega. Se extiende la presente en la Ciudad de el de del 20.....

COMERCIALIZADORA KELLY S.A. DE C.V.
 Fuentes de Pirámides, Ext.1, Int.604, Lomas de Tecamachalco
 Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México.
 C.P.53950
 Tel. 0155 3093 9090 y/o 01 800 087 0890

Términos y Condiciones

- Esta garantía ampara cualquier defecto de fabricación, piezas y componentes y mano de obra; siendo responsabilidad exclusiva de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HERGOM efectuar las revisiones correspondientes y/o ajustes que se requieran durante la vigencia de la póliza, a condición de que el personal de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HERGOM sea el único que intervenga para efectuar dichas intervenciones, liberando al consumidor por costos de reparación y mano de obra siempre y cuando sea defecto de fabricación y no por mal uso.
- El consumidor se obliga a entregar el equipo dañado, motivo de ésta Póliza, el cual deberá estar completo y sin daños visibles.
- Esta garantía ampara únicamente el producto arriba especificado.
- Para validar dicha Póliza será necesario en todo caso, presentar esta garantía debidamente requisitada y sellada o factura de compra, en nuestro centro de servicio técnico ubicado en Poniente 126 A No.62 Col.Nueva Vallejo, Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México. C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales HERGOM Puebla, Guadalajara o Monterrey con líneas de atención al 01 800 087 0890, quien será responsable de los gastos de transportación, para hacer efectiva esta garantía.

5. Los accesorios, refacciones, componentes y/o consumibles podrán ser adquiridos en Comercializadora Kelly S.A. de C.V. Fuentes de Pirámides, Ext.1, Int.604, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México. C.P.53950

Situaciones No Cubiertas Por La Garantía

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Nombre:

Firma:

Fecha de Entrega:

Sello de Validez



COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNA CON SISTEMA DE BURBUJAS

El colchón CC01 consta de dos partes: El colchón y la bomba. La bomba utiliza un pequeño compresor ultra silencioso y eficiente.

El panel de control es sencillo y muy fácil de usar. El colchón alivia la presión secuencialmente al desinflar e inflar las células de aire alternativamente en intervalos de tiempo de 6 minutos aproximadamente.

Se ha comprobado que la presión constante a una prominencia ósea es la principal causa de deterioro de la piel y causa de la aparición de llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas. El movimiento continuo suministrado por la unidad disminuye las áreas de presión constante, además es altamente recomendado en el tratamiento y prevención de lesiones, disminuye la sudoración, favorece la curación de las heridas y brinda comodidad al paciente.

OPERACIÓN

1. Coloque el colchón sobre la cama con la válvula para la manguera hacia la piecera de la cama. (Vea diagrama 2)
2. Despliegue los ganchos integrados y cuelgue la bomba en la estructura a los pies de la cama o coloque sobre una superficie plana y lisa. (Vea diagrama 2)
3. Conecte la manguera a la válvula del colchón y posteriormente a la válvula de la bomba.
4. Conecte la bomba a una toma de corriente eléctrica. Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre lejos de posibles peligros.
5. Encienda el interruptor en el panel de control de la bomba. La bomba comenzará a inflar el colchón. (Vea diagrama 1)
6. Posteriormente ajuste la presión del aire en el colchón con el regulador en el panel de control de la bomba. (Vea diagrama 1)

PRECAUCIÓN



No fumar cerca de la bomba.



Mantener la bomba lejos de superficies calientes.



Riesgo de explosión si se utiliza en presencia de anestésicos inflamables.



Reemplace el fusible como se marca: 250 T1A



Entrada de energía:
AC 110V 60Hz; 0.1 A

INCLUYE

- 1 Colchón inflable con sistema de burbujas
- 1 Bomba de aire
- 1 Manguera
- 2 Fusibles de refacción
- 2 Parches para reparación

CARACTERÍSTICAS

Diagrama 1


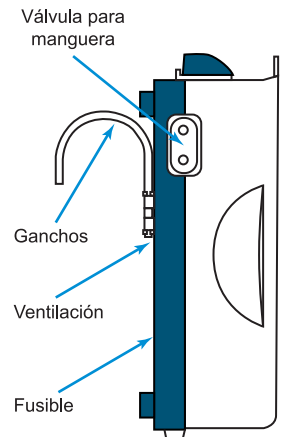


Diagrama 2

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

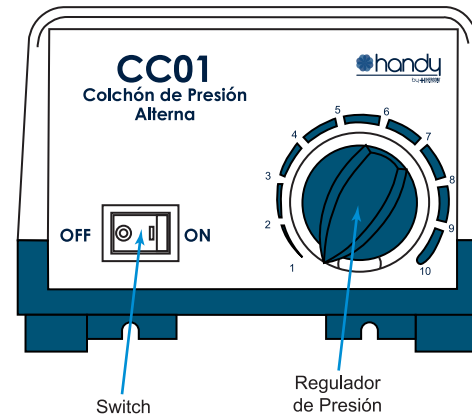