



CC01
Colchón de Presión
Alterna
con sistema de burbujas

MANUAL DE USUARIO



Póliza de Garantía

Producto Modelo

Marca No. de Serie

La presente garantía tiene vigencia por 1 año a partir de la fecha de entrega. Se extiende la presente en la Ciudad de del 20..... el de

COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V.
Poniente 128, No. 19, Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México.

Tel. 55 3093 9090 y/o 800 087 0890

Términos y Condiciones

- Esta garantía ampara cualquier defecto de fabricación, piezas y componentes y mano de obra; siendo responsabilidad exclusiva de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HERGOM efectuar las revisiones correspondientes y/o ajustes que se requieran durante la vigencia de la póliza, a condición de que el personal de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HERGOM sea el único que intervenga para efectuar dichas intervenciones; liberando al consumidor por costos de reparación y mano de obra siempre y cuando sea defecto de fabricación y no por mal uso.
- El consumidor se obliga a entregar el equipo defectuoso, motivo de ésta Póliza, el cual deberá estar completo y sin daños visibles.
- Esta garantía ampara únicamente el producto arriba especificado.
- Para hacer EFECTIVA esta garantía será necesario en todo caso, presentar esta garantía debidamente requisitada y sellada o factura de compra, en nuestro centro de servicio técnico ubicado en Poniente 126-A No.62 Col.Nueva Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México. C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales HERGOM: Puebla 13 Sur No.1503, Col. Santiago, C.P. 72000, Puebla, Puebla, Guadalajara: Sierra Nevada No. 913, Col. Independencia, C.P.42340, Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey: Celaya No. 305, Col. Mitras Centro, C.P. 64460, Monterrey Nuevo León, con líneas de atención al 800 087 0890.

5. Los accesorios, refacciones, componentes y/o consumibles podrán ser adquiridos en cualquiera de las sucursales que tiene HERGOM como el Centro de Servicio Técnico ubicado en Poniente 126-A No.62 Col.Nueva Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México. C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales HERGOM Puebla, Guadalajara o Monterrey con líneas de atención al 800 087 0890.

Situaciones No Cubiertas Por La Garantía

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Cuando el producto hubiese sufrido algún daño por descarga eléctrica o variación de voltaje.
- Desgaste natural de la mercancía.
- Daños causados por agentes externos de carácter químico o electroquímico, así como invasión de cuerpos extraños como agua, arena, plagas, etc.
- Productos que presenten el número de serie alterado o removido.
- Gastos de envío u operación logística para llevar a cabo el proceso de garantía.
- Cuando el producto haya sido adquirido fuera de los canales legales de compra.

Nombre:

Firma:

Fecha de Entrega:

Sello de Validez



COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNA CON SISTEMA DE BURBUJAS

El colchón CC01 consta de dos partes: El colchón y la bomba. La bomba utiliza un pequeño compresor ultra silencioso y eficiente.

El panel de control es sencillo y muy fácil de usar. El colchón alivia la presión secuencialmente al desinflar e inflar las células de aire alternativamente en intervalos de tiempo de 6 minutos aproximadamente.

Se ha comprobado que la presión constante a una prominencia ósea es la principal causa de deterioro de la piel y causa de la aparición de llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas. El movimiento continuo suministrado por la unidad disminuye las áreas de presión constante, además es altamente recomendado en el tratamiento y prevención de lesiones, disminuye la sudoración, favorece la curación de las heridas y brinda comodidad al paciente.

OPERACIÓN

1. Coloque el colchón sobre la cama con la válvula para la manguera hacia la piecera de la cama. (Vea diagrama 2)
2. Despliegue los ganchos integrados y cuelgue la bomba en la estructura a los pies de la cama o coloque sobre una superficie plana y lisa. (Vea diagrama 2)
3. Conecte la manguera a la válvula del colchón y posteriormente a la válvula de la bomba.
4. Conecte la bomba a una toma de corriente eléctrica. Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre lejos de posibles peligros.
5. Encienda el interruptor en el panel de control de la bomba. La bomba comenzará a inflar el colchón. (Vea diagrama 1)
6. Posteriormente ajuste la presión del aire en el colchón con el regulador en el panel de control de la bomba. (Vea diagrama 1)

PRECAUCIÓN




No fumar cerca de la bomba.



Mantener la bomba lejos de superficies calientes.



Riesgo de explosión si se utiliza en presencia de anestésicos inflamables.

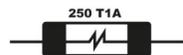

Reemplace el fusible como se marca: 250 T1A



Entrada de energía: AC 110V 60Hz; 0.1 A

INCLUYE

- 1 Colchón inflable con sistema de burbujas
- 1 Bomba de aire
- 1 Manguera
- 2 Parches para reparación

CARACTERÍSTICAS

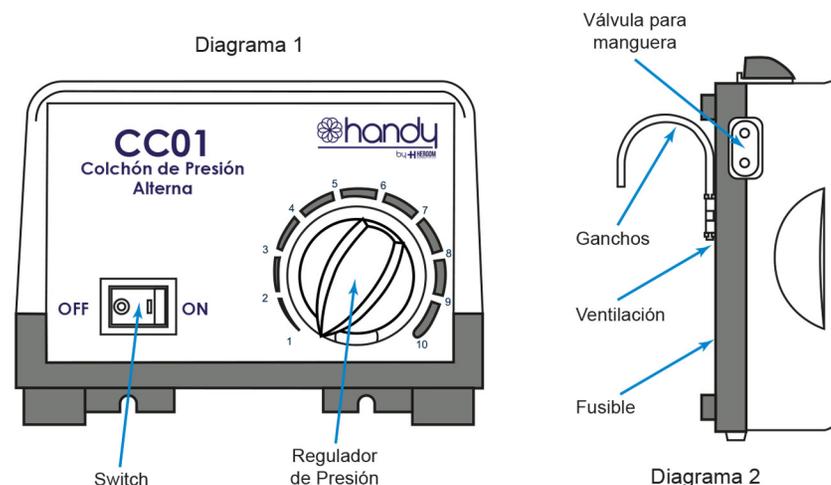


DIAGRAMA DEL CIRCUITO

