

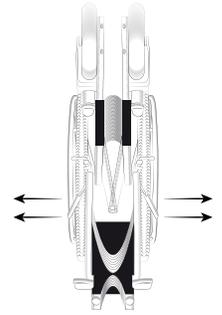
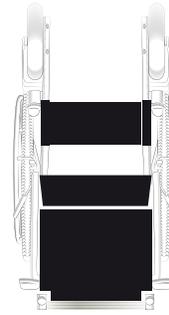


Silla de Ruedas

Handy Sólida S200

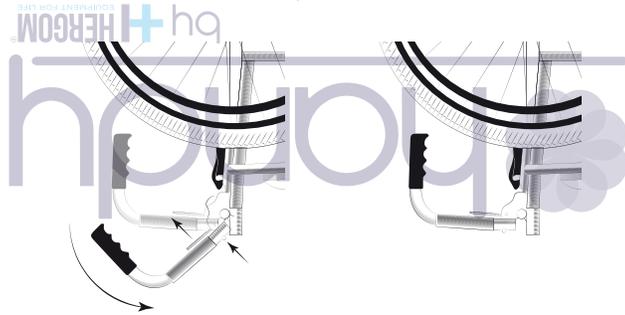

Instructivo

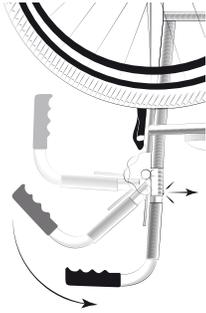

Despliegado de la silla

- 1 silla de ruedas
- 1 manual de instrucciones
- 1 par de descansos pies
- 2 pernos
- 2 tuercas

El contenido se compone de:

Handy Sólida S200 viene empaquetada. Guarde el embalaje siempre que le sea posible, para cualquier almacenamiento posterior de la silla de ruedas. Después de recibir la silla de ruedas compruebe que el contenido esté íntegro.

Introducción

Handy Sólida S200 aporta gran comodidad y ergonomía al paciente gracias a sus descansos brazos y asiento acolchados, la silla de ruedas S200 cuenta con una estructura plegadiza y ligera ideal para transportarse a cualquier lugar.

Despliegado del respaldo

El respaldo de la silla de ruedas S200 cuenta con sistema de plegado y manubrios abatibles, los cuales deberá tirar de ellos y presionar las palancas de seguridad como se muestra en la imagen, asegúrese que los botones de seguridad emerjan de la estructura tubular como se muestra en el diagrama.

La silla de ruedas se encuentra plegada al retirarla de su empaque, por favor realice los siguientes pasos.
Coloque al frente de la silla de ruedas y sostenga firmemente la base del asiento. Posteriormente tire de ambos lados y despliegue. Asegure que se encuentre completamente desplegada.



