



## TERMÓMETRO DIGITAL VETERINARIO

- Diseño simple y ergonómico.
- Medición precisa y confiable.
- Temperatura instantánea.
- Rango de temperatura: 32.0 °C ~ 44.0 °C
- Pantalla LCD.

### Instrucciones de uso

1. Encienda el termómetro presionando el botón
2. El termómetro sonará "Beep", después de que el sonido se detenga estará listo para usarse.
3. Inserte la punta del termómetro dentro del recto del animal
4. Con 6 segundos el termómetro sonará "Beep" y mostrara la lectura de la temperatura.
5. Apagado automáticamente.

### Especificaciones técnicas

- Temperatura instantánea.
- Indicación de "Beep".
- Pantalla LCD y memoria.
- Temperatura de visualización, en ambas escalas Celsius y Fahrenheit.
- Fácil operación.
- Reciclable & Saneamiento & Seguro.
- Apagado automático.
- Apto para medir tipos de animales como perros, gatos, puercos, ganado y así sucesivamente.

